

GHIACCIO in BUSTA PHARMA FREEZE

Ghiaccio istantaneo monouso

Dispositivo Medico  0546 CND M9001 N.Repertorio 166939/R

Composizione:	Miscela di Sali azotati con caratteristiche tecniche accettate dalla norme vigenti (conforme ai requisiti del Reg. CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. 552/09) Bolla d'acqua interna in materiale biaccoppiato (coperta da brevetto).
Aspetto:	Busta in PE (disponibile in TNT)
Confezione:	- Busta monouso in cartone da 25 buste
Proprietà e Vantaggi:	<ul style="list-style-type: none"> Il GHIACCIO BUSTA PHARMA FREEZE raffredda parti contuse o traumatizzate in seguito ad incidenti sportivi, lavorativi o d'altro genere, apportando un rapido sollievo e decongestionando la parte colpita. La temperatura raggiunge -5°C e arriva a 0°C in circa 30'.
Validità:	5 anni dalla data di produzione (riportata sul retro della busta).
Indicazioni d'uso	<ul style="list-style-type: none"> Afferrare la busta nel bordo in alto e far discendere verso il basso la sostanza granulare; Premere con forza verso il centro fino a rompere la vescica contenente la soluzione refrigerante; Agitare bene per favorire la dissoluzione dei Sali azotati nella bolla d'acqua. <p>PRECAUZIONI D'USO: Prodotto non riutilizzabile; Se non utilizzato è stabile a temperatura ambiente; Tenere lontano dalla portata dei bambini; Non esporre a fonti di calore e prodotti infiammabili; In caso di rottura accidentale della busta se il contenuto è venuto a contatto della pelle o degli occhi, lavare con abbondante acqua; In caso di ingestione accidentale del contenuto, contattare il più vicino Centro Antiveleni.</p>
Applicazioni:	Nel Pronto Soccorso di Enti, Unioni Volontarie di Assistenza, Centri e Società Sportive, Palestre, Scuole, Uffici.

Informazioni riservate a personale qualificato